

CEDERROTH

STATION DE DOUCHE OCULAIRE

La solution tamponnée augmente les chances de sauver vos yeux

La Douche Oculaire Cederroth est conçue pour restaurer le pH de l'œil, c'est-à-dire qu'elle a un effet neutralisant sur les projections basiques et acides.* Le résultat est plus rapide qu'avec une solution de rinçage ordinaire. Durée de conservation de 4 ans et demi.

Si un accident se produit avec une substance contenant du calcium (ciment, béton ou chaux), le rinçage peut s'effectuer en toute sécurité avec la Douche Oculaire Cederroth puisqu'elle est 100 % sans phosphate.

Avec un rinçage oculaire contenant du phosphate, il existe un risque de calcification - un effet secondaire où le phosphate du liquide réagit avec le calcium en formant un précipité blanc insoluble qui endommage l'œil encore plus.

La station contient 2 flacons de douche oculaire. Le flacon est conçu pour rincer l'œil avec un débit abondant pendant environ 1 minute et demie. Veiller à disposer de plusieurs flacons pour pouvoir effectuer un rinçage long, au moins 15 minutes. Son œillère unique aide à maintenir l'œil ouvert.

DISTRIBUTEUR DE PANSEMENTS ET COMPARTIMENT SUPPLÉMENTAIRE

La station de Douche Oculaire contient un distributeur de pansements Salvequick ainsi qu'un espace supplémentaire qui permet de stocker des produits au choix : pansements Stop-sang, lunettes ou gants de protection.

L'ŒILLÈRE INTÉGRÉE DIRIGE LE LIQUIDE DANS L'ŒIL SANS GASPILLAGE

L'œillère aide à maintenir l'œil ouvert pendant le rinçage. Comme elle est transparente, un collègue peut vérifier que l'œil reste ouvert.

FORME
UNIQUE !



STATION DE DOUCHE OCULAIRE CEDERROTH REF 721500
CEDERROTH EYE WASH STATION REF 721500
Dimensions : L 29 x H 56 x P 12 cm

2 x 500 ml Douche Oculaire Cederroth (REF 725200)
1 distributeur de pansements Salvequick comprenant
1 (x 40) pansements textiles (REF 6444)
1 (x 45) pansements plastiques (REF 6036)
1 illustration de Douche Oculaire
1 clé

* L'effet est généralement plus puissant sur les bases que sur les acides.